

Информация по версии программного обеспечения GeneXpert® Dx 6.2

Настоящий документ содержит новую информацию, известные ограничения и разъяснения, не приведенные в *руководстве оператора GeneXpert Dx System*.

Осторожно!

Компания Cepheid рекомендует всегда подтверждать соответствие результатов, отправленных в ЛИС, и результатов теста на системе GeneXpert после внесения каких-либо изменений в GeneXpert или хост-компьютер, включая (в числе прочих) следующие изменения:

- версии программного обеспечения GeneXpert
- версии определения анализа GeneXpert
- настроек связи хост-компьютера GeneXpert
- связующего программного обеспечения хост-компьютера или его конфигурации
- программного обеспечения или конфигурации ЛИС

1 Создать анализ

- 1.1 Не сканируйте штрих-код в поле ID пациента (Patient ID) или ID образца (Sample ID) диалогового окна Создать анализ (Create Test), если вы уже вносили изменения в указанное поле. Сканирование штрих-кода после внесения изменений в поле приведет к сканированию неверных знаков. Чтобы обновить поле ID пациента (Patient ID) или ID образца (Sample ID), закройте диалоговое окно Создать анализ (Create Test), а затем вновь выберите Создать анализ (Create Test) и просканируйте штрих-код идентификатора.
- 1.2 GX Dx 4.6 и более поздние версии не поддерживают сочетание анализов BA 4-Plex и BG Duplex.

2 Обслуживание

Техническое обслуживание поршня не следует производить во время проведения тестов. Если техническое обслуживание начинают во время проведения тестов и на каком-либо модуле такое обслуживание невозможно завершить (опустить, а затем поднять шток шприца), программное обеспечение GeneXpert Dx необходимо перезапустить **по завершении** тестов.

3 Локализация

При эксплуатации программного обеспечения GeneXpert в конфигурации для русского языка диалоговые окна выбора файлов содержат некоторые надписи на английском языке, не переведенные на русский. Это касается диалоговых окон **Сохранить (Save)**, отображаемого из окна Архивировать анализ (Archive Test), **Открыть (Open)**, отображаемого из окна Извлечь анализ (Retrieve Test), Резервное копирование базы данных (Database Backup) и **Выбрать файл (Select File)**, отображаемого из окна Восстановление базы данных (Database Restore).

Информация по версии программного обеспечения GeneXpert® Dx 6.2

Эти надписи следует перевести следующим образом:

Look In - Найти в
File Name - Имя файла
Files of Type - Тип файлов
Cancel - Отменить
Open – Открыть