

# GeneXpert® Infinity システムメンテナンスログ

年 / 月:

年4回のメンテナンス実施日:

年次メンテナンスの実施日:

施設名

シリアル番号

- 使用説明: 1. 施設名、GeneXpert Infinityシステムシリアル番号、年次メンテナンスの実施日、年4回のメンテナンス実施日、現在の年 / 月を上記に記入してください。  
 2. 以下にリストされた各メンテナンス作業について、その作業を実施した日付の下のボックスにチェックマークを入れ、その下の行にご自分のイニシャル（最大2文字）を記入してください。  
 3. データの入力後、ファイルを保存します。すべての作業を記録するため、毎月、1つのファイルを保存することを推奨します。

毎週のメンテナンス	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
キオスクのテーブルトップ、キーボード、モニターの清掃 <sup>1</sup>																															
コンベヤーベルトの短時間清掃 <sup>1</sup>																															
システムシャットダウンの実行 <sup>2</sup>																															
毎月のメンテナンス																															
掃除機によるリアファンフィルタの清掃 <sup>1</sup>																															
アーカイブ / パージテスト <sup>2,3</sup>																															
年4回のメンテナンス																															
キオスクスキャナの清掃																															
コンベヤーベルトの清掃 <sup>1</sup>																															
カートリッジベイとプランジャーロッドの清掃 <sup>1</sup>																															
機器表面の清掃 <sup>1</sup>																															
ファンフィルタの交換または清掃 <sup>1</sup>																															
毎年のメンテナンス																															
機器キャリブレーションの確認 <sup>4</sup>																															
必要に応じて																															
システムログとモジュールレポートの印刷 <sup>1</sup>																															
廃棄物コンテナを空にする / 交換 <sup>1</sup>																															
データベースのバックアップ <sup>2</sup>																															
機器表面の清掃 <sup>1</sup>																															
キーボードとマウスバッテリーの確認。必要に応じて交換。 <sup>1</sup>																															
テクニシャンのイニシャル(2文字)																															

1. 手順の詳細は、取扱説明書の9章（サービスとメンテナンス）を参照してください。

2. 手順の詳細は、取扱説明書の5章（操作方法）を参照してください。

3. データ管理の頻度とデータ保存場所は、検査室ごとに決定することができます。

4. キャリブレーションの確認は、フィールドサービスエンジニアまたは顧客が行う必要があります。

注記: これらは清掃に関する最小限の推奨事項です。施設側がそれより頻繁にメンテナンスを行うように求めることがあります。

参考: GeneXpertシステムInfinity取扱説明書 (P/N 302-1288-JA, Rev. A)

