

# GeneXpert®-järjestelmän kunnossapitoloki

Kuukausi ja vuosi:

Kalibroititarkistus tehty viimeksi:

Asennuspäivä:

Laitoksen nimi

GeneXpert-sarjanumero

Ohjeet:

1. Anna yllä oleviin kenttiin laitoksen nimi, GeneXpert-sarjanumero, nykyinen kuukausi ja vuosi, viimeisin kalibroititarkistuspäivä ja asennuspäivä.
2. Merkitse kunkin alla luetellun huoltotoimen kohdalla kuukaudesta sen päivän ruudut, jona toiminta suoritettiin, ja kirjoita nimikirjaimesi (enintään 2 merkkiä) alariville.
3. Tallenna tiedosto syötettyäsi tiedot. Suosittelemme, että tallennat yhden tiedoston kuukausittain, jotta saat täydellisen tallenteen toiminnoista.

<b>Päivittäinen huolto</b>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Puhdista työalue																															
Sulje kaikki moduulin luukut																															
Hävitä käytetyt kasetit																															
<b>Viikoittainen huolto</b>																															
Sammuta GeneXpert-instrumentti <sup>1</sup> ja tietokone <sup>1</sup>																															
Puhdista tuulettimen esisuodattimet <sup>1</sup>																															
<b>Kuukausittainen huolto</b>																															
Arkistointitestit <sup>2</sup>																															
Tyhjennystestit <sup>2</sup>																															
<b>Neljännenvuosittainen huolto</b>																															
Puhdista männänvarsi ja kasettisyvennykset <sup>1</sup>																															
Puhdista instrumentin pinnat <sup>1</sup>																															
Vaihda tuulettimen suodattimet <sup>1</sup>																															
Vaihda tuulettimen esisuodattimet <sup>1</sup>																															
<b>Vuosittainen huolto</b>																															
Tarkista instrumentin vuosittainen huolto <sup>1</sup>																															
<b>Tarpeen mukaan</b>																															
Tulosta järjestelmälokiraportti <sup>1</sup>																															
Varmuuskopioi tietokanta <sup>2</sup>																															
Puhdista I-CORE I-CORE-puhdistusharjalla <sup>1</sup>																															
Teknikon nimikirjaimet (kaksi kirjainta)																															

1. Katso yksityiskohtaiset ohjeet käyttöoppaan luvusta 9 (Huolto ja kunnossapito).

2. Katso yksityiskohtaiset ohjeet käyttöohjeen luvusta 5 (Käyttöohjeet).

Nämä ovat puhdistusta koskevat vähimmäissuosituksen. Laitoksesi saattaa vaatia huoltoa useammin.