

# A GeneXpert® rendszer karbantartási naplója

Hónap és év:

Legutóbbi kalibráció-ellenőrzés:

Telepítés dátuma:

Intézmény neve

GeneXpert-sorozatszám

- Utasítások: 1. A fenti mezőkben adja meg az intézmény nevét, a GeneXpert-sorozatszámot, az aktuális hónapot és évet, a legutóbbi kalibráció-ellenőrzés dátumát és a telepítés dátumát.  
2. Minden alább felsorolt karbantartási tevékenység esetén jelölje be a tevékenység elvégzésének hónapja alatti négyzet(eke)t, és írja be monogramját (legfeljebb 2 karakter) az alsó sorba.  
3. Mentse a fájlt az adatok bevitele után. Javasoljuk, hogy havonta egy fájlt mentsen el a tevékenységek teljes nyilvántartásához

Napi karbantartás	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Tisztítsa meg a munkaterületet.																															
Zárja be az összes modulajtót.																															
Dobja ki a használt kazettákat.																															
<b>Heti karbantartás</b>																															
Kapcsolja ki a GeneXpert műszert <sup>1</sup> és a számítógépet <sup>1</sup>																															
Ventilátor előszűrőinek tisztítása <sup>1</sup>																															
<b>Havi karbantartás</b>																															
Archiválja a tesztek <sup>2</sup>																															
Törölje a tesztek <sup>2</sup>																															
<b>Negyedéves karbantartás</b>																															
Tisztítsa meg a dugattyúrudat és a kazettarekeszeket <sup>1</sup>																															
Tisztítsa meg a műszer felületeit <sup>1</sup>																															
A ventilátorszűrők cseréje <sup>1</sup>																															
Cserélje ki a ventilátorszűrőket-eloszűrőket <sup>1</sup>																															
<b>Éves karbantartás</b>																															
Tekintse át a műszer éves karbantartását <sup>1</sup>																															
<b>Szükség szerint</b>																															
Nyomtassa ki a rendszernapló-jelentést <sup>1</sup>																															
Készítsen biztonsági mentést az adatbázisról <sup>2</sup>																															
Tisztítsa meg az I-CORE-t az I-CORE tisztítókeféjével <sup>2</sup>																															
Technikus monogramja (két betű)																															

1. A részletes eljárást lásd a Kezelői kézikönyv 9. fejezetében (Szervizelés és karbantartás).  
2. A részletes eljárást lásd a Kezelői kézikönyv 5. fejezetében (Üzemeltetési utasítások).  
Ezek a tisztításra vonatkozó minimális ajánlások. Előfordulhat, hogy intézménye gyakoribb karbantartást ír elő.  
Hivatkozások: A GeneXpert rendszer kezelői kézikönyve (cikkszám: 303-1548-HU, „A” átdolg.)