

# Sistēmas GeneXpert® uzturēšanas žurnāls

Mēnesis un gads:

Pēdējās kalibrēšanas pārbaudes datums:

Instalēšanas datums:

Iestādes nosaukums

GeneXpert sērijas numurs

- Instructions: 1. Iepriekš redzamajos laukos ievadiet savas iestādes nosaukumu, GeneXpert sērijas numuru, pašreizējo mēnesi un gadu, pēdējās kalibrēšanas pārbaudes datumu un instalēšanas datumu.
2. Katrai tālāk norādītajai uzturēšanas darbībai atzīmējiet izvēles rūtiņu(-as) zem tās mēneša dienas, kurā tika veikta darbība, un apakšējā rindā ievadiet savus iniciāļus (ne vairāk kā 2 rakstzīmes).
3. Pēc datu ievadišanas saglabājiet failu. Ieteicams katru mēnesi saglabāt vienu failu, lai nodrošinātu pilnu darbību reģistru.

<b>Ikdienas uzturēšana</b>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Notīriet darba zonu																															
Aizveriet visas moduļu durtiņas																															
Izmetiet izlietotos kārtidžus																															
<b>Iknedēļas uzturēšana</b>																															
Izslēdziet GeneXpert datoru un instrumentu <sup>1</sup>																															
Iztīriet ventilatora priekšfiltrus <sup>1</sup>																															
<b>Ikmēneša uzturēšana</b>																															
Arhivējiet testus <sup>2</sup>																															
Iztīriet testus <sup>2</sup>																															
<b>Uzturēšana reizi ceturksnī</b>																															
Notīriet virzuļstieni un kārtidžu nišas <sup>1</sup>																															
Notīriet instrumenta virsmas <sup>1</sup>																															
Nomainiet ventilatora filtrus <sup>1</sup>																															
Nomainiet ventilatora priekšfiltrus <sup>1</sup>																															
<b>Ikgadējā uzturēšana</b>																															
Ikgadējā instrumenta uzturēšanas pārbaude <sup>1</sup>																															
<b>Pēc nepieciešamības</b>																															
Izdrukājiet sistēmas žurnāla pārskatu <sup>1</sup>																															
Dublējiet datubāzi <sup>2</sup>																															
Iztīriet moduli I-CORE, izmantojot I-CORE tīrīšanas slotiņu																															
Tehniķa iniciāļi (divi burti)																															

1. Detalizētu procedūras aprakstu skatiet operatora rokasgrāmatas 9. nodaļā (Apkope un uzturēšana).
2. Detalizētu procedūras aprakstu skatiet operatora rokasgrāmatas 5. nodaļā (Lietošanas norādījumi).
- Šie ir minimālie tīrīšanas ieteikumi. Jūsu iestādē var būt noteikta biežāka uzturēšanas darbu veikšana.

Atsauce: GeneXpert GX Dx operatora rokasgrāmata (P/N 303-1548-LV, red. A)