

GeneXpert® Журнал технічного обслуговування системи

Місяць і рік:

Дата останньої перевірки калібрування:

Дата інсталяції:

Назва установи

Серійний номер GeneXpert

- Інструкції: 1. Введіть назву своєї установи, серійний номер GeneXpert, теперішній місяць та рік, дату останньої перевірки калібрування та дату інсталяції в полях, наведених вище.
 2. Для кожної роботи з технічного обслуговування, наведеної нижче, позначте день місяця, коли цю роботу проведено, та введіть свої ініціали (максимум 2 символи) у нижньому рядку.
 3. бережіть файл після введення даних. Ми радимо зберігати один файл кожного місяця для повної реєстрації робіт.

Технічне обслуговування щодня	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Очищення робочої області																															
Закриття всіх дверей модуля																															
Утилізація використаних картриджів																															
Технічне обслуговування щотижня																															
Вимкнути живлення комп'ютера та інструменту GeneXpert ¹																															
Очистити префільтри вентилятора ¹																															
Технічне обслуговування щомісяця																															
Архівація аналізів ²																															
Видалення аналізів ²																															
Технічне обслуговування щокварталу																															
Очистити плунжерні штоки та картриджеві відсіки ¹																															
Очистити поверхні аналізаторів ¹																															
Заміна фільтрів вентилятору ¹																															
Заміна префільтрів вентилятора ¹																															
Технічне обслуговування щороку																															
Перевірити щорічне технічне обслуговування модуля ¹																															
За необхідності																															
Надрукувати звіт системного журналу ¹																															
Провести резервне копіювання бази даних ²																															
Очистити I-CORE, використовуючи щітку для чищення I-CORE ¹																															
Ініціали техніка (дві літери)																															

1. Зверніться до Глави 9 (Сервіс та технічне обслуговування) Інструкції із використання, де наведено детальний опис процедури.
 2. Зверніться до Глави 5 (Інструкції з експлуатації) Інструкції із використання, де наведено детальний опис процедури.
 Це -- мінімальні рекомендації з чистки. У вашому закладі можуть бути інші вимоги для чистки, які треба виконувати частіше.