

## Notes de publication du logiciel Cepheid OS v1.0

Ce document contient de nouvelles informations, des limites connues et des éclaircissements qui ne sont pas décrits dans le *manuel d'utilisation de l'écran tactile du système GeneXpert®*.

### Nouveau logiciel

Le logiciel Cepheid OS est une nouvelle version du logiciel de Cepheid, dont les principales fonctionnalités sont les suivantes :

- **Créer le schéma opérationnel d'un test** – Le logiciel utilise un schéma opérationnel simplifié pour exécuter des tests et déterminer les résultats des tests.
- **Localisation** – Le logiciel est disponible dans les langues suivantes : allemand, anglais, espagnol, français, italien, néerlandais, polonais, portugais et suédois.
- **Nouvelle prise en charge matérielle** – Le logiciel est compatible avec le nouveau système GeneXpert avec écran tactile.

### Problèmes connus

#### Attention :

Cepheid recommande de vérifier que les résultats téléchargés vers le SIL correspondent aux résultats de test GeneXpert après toute modification du système GeneXpert ou de l'hôte, y compris (mais sans s'y limiter) les modifications concernant :

- Version de Cepheid OS
- La version du fichier de définition du test GeneXpert
- Les paramètres de communication GeneXpert – hôte
- Modifications apportées à l'intergiciel ou à la configuration de l'hôte
- Modifications apportées au logiciel ou à la configuration du SIL

### Problème de création de test

Il est impossible de modifier la commande de l'hôte du test après avoir sélectionné et confirmé la commande de l'hôte pour un test. Pour y remédier, quittez le schéma opérationnel Créer un test (Create Test) afin de sélectionner à nouveau la commande de l'hôte.

### Problèmes généraux

1. Au cours de l'impression, si l'utilisateur annule l'impression ou aucune imprimante n'est connectée, l'utilisateur recevra un message « L'impression est terminée. » («Printing was successful») sur le logiciel Cepheid OS. L'utilisateur doit vérifier que l'imprimante est connectée avant de lancer l'impression.
2. Si une sauvegarde de la base de données est initiée pendant le chargement des résultats de tests dans un gestionnaire des données du point d'intervention au plus proche des patients (POCDM), un résultat de test peut être envoyé au POCDM plusieurs fois.

## Notes de publication du logiciel Cepheid OS v1.0

3. Dans l'onglet Paramètres de communication de l'hôte (Host Communication Settings), si un numéro de port supérieur à 2,147,483,647 est saisi et si le protocole de communication de l'hôte change, une boîte de dialogue d'erreur s'ouvre.
4. Le système est configuré pour ouvrir les fichiers d'un simple appui du doigt. Si vous appuyez deux fois sur un fichier (par exemple, lors de l'importation du test), une navigation inattendue est possible.
5. En cas de récupération de tests à partir d'un logiciel GeneXpert antérieur (GeneXpert Dx 5.3 et versions antérieures) dans le logiciel Cepheid OS, les messages d'erreur de ces tests ne seront pas traduits dans la langue actuelle sélectionnée par l'utilisateur. Les messages d'erreur resteront dans la langue dans laquelle ils ont été générés.