

Onderhoudslogboek GeneXpert®-systeem met aanraakscherm

Maand en jaar:

Datum laatste kalibratiecontrole:

Datum van installatie door field application specialist:

Naam instelling

Serienummer GeneXpert

- Instructies: 1. Voer de naam van uw instelling, het GeneXpert-serienummer, de huidige maand en het huidige jaar, de datum van de laatste kalibratiecontrole en de datum van installatie door de field application specialist in de bovenstaande velden in.
 2. Vink voor elke hieronder vermelde onderhoudswerkzaamheid het vakje/de vakjes aan onder de dag van de maand waarop de werkzaamheden zijn verricht en voer uw initialen (maximaal 2 tekens) op de onderste regel in.
 3. Sla het bestand op nadat u de gegevens hebt ingevoerd. Wij adviseren om elke maand één bestand op te slaan, met het oog op een complete administratie van de werkzaamheden.

Dagelijks onderhoud	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Werkgebied reinigen																															
Alle moduledeuren sluiten																															
Gebruikte cartridges wegwerpen																															
Wekelijks onderhoud																															
GeneXpert-instrument uitschakelen ¹																															
Het aanraakscherm uitschakelen ¹																															
Maandelijks onderhoud																															
Monthly Maintenance																															
Tests archiveren ²																															
Tests opschonen ²																															
Driemaandelijks onderhoud																															
Plunjerstang en cartridgehouders reinigen ¹																															
Oppervlakken instrument reinigen ¹																															
Ventilatorfilters van instrument vervangen ¹																															
Jaarlijks onderhoud																															
Jaarlijks instrumentonderhoud controleren ¹																															
Wanneer vereist																															
I-CORE® Module reinigen met I-CORE ¹ reinigingsborstel																															
Systeemlograpport afdrukken ¹																															
Back-up van database maken ²																															
Initialen technicus (twee letters)																															

1. Zie hoofdstuk 9 (Reparaties en onderhoud) van de bedieningshandleiding voor de details van de procedure.

2. Zie hoofdstuk 5 (Bedieningsinstructies) van de bedieningshandleiding voor de details van de procedure.

Dit zijn minimale aanbevelingen voor reiniging. Mogelijk schrijft uw instelling voor dat er vaker onderhoud moet worden uitgevoerd.