

Underhållslogg för GeneXpert®-system med pekskärm

Månad och år:

Datum för senaste kalibreringskontroll:

Namn på institution

GeneXpert-serienummer

Datum för installation av FAS:

- Instruktioner:
1. Ange namnet på din institution, GeneXpert-serienumret, nuvarande månad och år, datum för senaste kalibreringskontroll och installationsdatum för FAS i ovanstående fält.
 2. Markera rutan/rutorna för varje nedan listad underhållsaktivitet på den dagen i den månaden som aktiviteterna utfördes och ange dina initialer (maximalt 2 tecken) på nedersta raden.
 3. Spara filen efter datainföringen. Vi rekommenderar att en fil sparas varje månad för en fullständig registrering av aktiviteter.

Dagligt underhåll	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31				
Dagligt underhåll																																			
Stäng alla moduldörrar																																			
Kasta bort använda kassetter																																			
Veckounderhåll																																			
Stäng av GeneXpert-instrumentet ¹																																			
Stäng av pekskärmen ¹																																			
Rengör instrumentets fläktfilter																																			
Månadsunderhåll																																			
Arkivera tester ²																																			
Avlufta tester ²																																			
Kvartalsvis underhåll																																			
Rengör kolvstång och kassettrymmen ¹																																			
Rengör instrumentytor ¹																																			
Byt ut instrumentets fläktfilter ¹																																			
Årligt underhåll																																			
Kontrollera årligt instrumentunderhåll ¹																																			
Vid behov																																			
Rengör I-CORE® Module med I-CORE-rengöringsborste ¹																																			
Skriv ut systemets loggrapport ¹																																			
Säkerhetskopiera databasen ²																																			
Teknikerns initialer (två bokstäver)																																			

1. Se Kapitel 9 (Service och underhåll) i användarmanualen för detaljerad metod.

2. Se Kapitel 5 (Användningsinstruktioner) i användarmanualen för detaljerad metod.

Dessa är minimirekommendationer för rengöring. Din institution kan kräva att underhåll utförs på ett mer regelbundet sätt.