

Criar um teste

Toque em **NOVO TESTE (NEW TEST)** no ecrã INÍCIO (HOME). Seguir as instruções para introduzir informações do teste e carregar o cartucho.

NEW TEST

Ver resultados e Relatório


1. Toque no separador **RESULTADOS (RESULTS)**.
2. Selecione os testes a visualizar.
3. Toque em **RELATÓRIO (REPORT)** para ver um teste.
4. Toque em **Guardar (Save)** para guardar um relatório.
5. Toque em **Imprimir (Print)** para imprimir um relatório.

REPORT

Encerrar Sistema

NOTA: Reinicie o sistema conforme necessário ou de acordo com o calendário de manutenção semanal. Ao efetuar esta tarefa, certifique-se de que não estão a ser executados testes.

1. Toque no menu Iniciar (Start) do Windows, toque no ícone Ligar/Desligar (Power) e selecione **Encerrar (Shut Down)**.
2. Aguarde cerca de 10 segundos para o Microsoft Windows encerrar e prima o botão de alimentação na parte de trás do ecrã tátil.
3. Prima o botão Ligar/Desligar na parte de trás do instrumento GeneXpert.

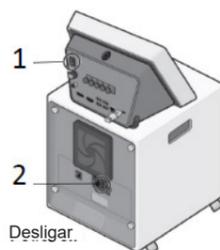

Limpar as hastes dos êmbolos e os compartimentos

Frequência: Trimestralmente
Consulte o manual do utilizador para obter instruções pormenorizadas.

1. Toque em **ADMIN (ADMIN) > Instrumento (Instrument) > Manutenção de haste do êmbolo (Plunger Rod Maintenance)**.
2. Selecione módulo(s), toque em **LIMPAR (CLEAN)**.
3. Humedeça um pano que não largue pelos com uma solução de lixívia doméstica à base de cloro diluída a 1:10. Limpe a haste do êmbolo e todo o interior do compartimento do cartucho 3 vezes com lixívia diluída, permitindo que a lixívia atue durante 2 minutos de cada vez.
4. Humedeça um pano que não largue pelos com uma solução de etanol a 70% ou álcool desnaturado. Limpe a haste do êmbolo e todo o compartimento do cartucho com solução de etanol para remover o resíduo de lixívia.
5. Mova o êmbolo para cima, e toque em **CONCLUÍDO (COMPLETE)**.

Importar os ficheiros de definição do ensaio

(se aplicável)

Importar ADF a partir do CD incluído. Alguns podem ser transferidos do website da Cepheid.

1. Transferir o ADF para o seu ecrã tátil.
2. Toque em **ADMIN (ADMIN)**, em seguida em **GERIR ENSAIOS (MANAGE ASSAYS)**.
3. Toque em **IMPORTAR ENSAIO (IMPORT ASSAY)**.
4. Navegue até ao ficheiro ADF. Toque em **Abrir (Open)**.

IMPORT ASSAY

Arquivar e purgar

Frequência: Arquivar e purgar conforme necessário de acordo com o calendário de manutenção semanal.

1. Toque no separador **ADMIN (ADMIN)**.
2. Toque em **ARQUIVAR TESTES (ARCHIVE TESTS)**.
3. Toque em **Selecionar todos (Select All)** ou selecione testes individuais a serem arquivados ou removidos.
Opcional:
Selecione **Purgar testes selecionados da lista depois de arquivar (Purge Selected Tests from List after Archiving)** se pretendido.
Ocultar ID (Cloak IDs) para ocultar informações sensíveis dos doentes.
4. Toque em **ARQUIVAR (ARCHIVE)** para arquivar os ficheiros numa localização de armazenamento.

Consulte o *Manual do utilizador do sistema GeneXpert com ecrã tátil (GeneXpert System with Touchscreen Operator Manual)* ou as Instruções de utilização do ensaio para obter informações detalhadas.

Para obter uma versão traduzida deste guia, transfira-a a partir do CD incluído.

Assistência técnica

Antes de contactar a assistência técnica da Cepheid, reunir:

- nome do produto
- número do cartucho e do lote de reagentes
- número de série do sistema
- mensagens de erro
- versão do software.

Registe um pedido de assistência online:
<https://www.cepheid.com/support>.

Estados Unidos **França**

Telefone: +1 888 838 3222 Telefone: +33 563 825 319
techsupport@cepheid.com support@cepheideurope.com



Guia de início rápido

Sistema GeneXpert® com ecrã tátil



302-5482-PT Rev. A Março de 2022

CORPORATE HEADQUARTERS EUROPEAN HEADQUARTERS www.Cepheidinternational.com

904 Caribbean Drive
Sunnyvale, CA 94089 USA

Vira Solelh
81470 Maurens-Scopont France

TOLL FREE +1.888.336.2743
PHONE +1.408.541.4191
FAX +1.408.541.4192

PHONE +33.563.82.53.00
FAX +33.563.82.53.01
EMAIL cepheid@cepheideurope.fr

© 2022 Cepheid


1

Desembalar, colocar e ligar

Coloque o instrumento numa superfície plana, nivelada e estável.

⚠ Evite colocar vários instrumentos próximos uns dos outros ou perto da ventilação. Assegurar um espaço livre mínimo de 5 cm (2").

1. Ligar os cabos de alimentação (1, 2, e 4).
2. Rodar cuidadosamente o conector prateado no sentido dos ponteiros do relógio para fixar o cabo de alimentação.
3. Ligar o cabo azul de rede (3) do instrumento à porta Rede (Network) no ecrã tátil.
4. Ligue o instrumento GeneXpert.
5. Ligue o ecrã tátil.

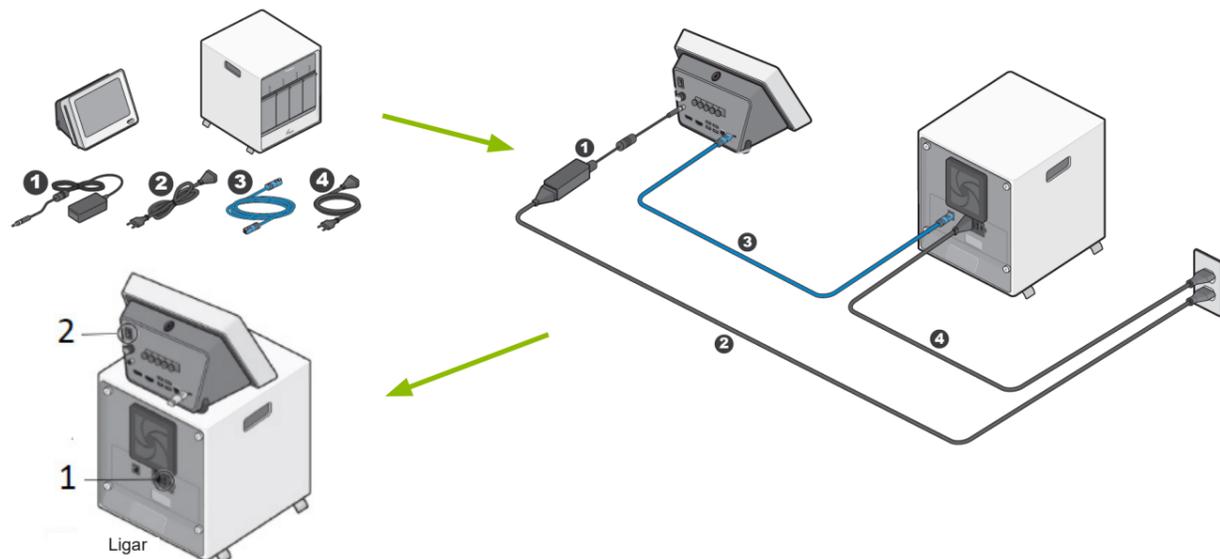


2

Iniciar sessão e

Renomear dispositivo

1. Deslize para cima no ecrã do Windows e digite a palavra-passe predefinida **cpht**.
2. O software Cepheid OS é iniciado e solicita tarefas de gestão de base de dados. Toque em **Não (No)**.
3. Toque em **ADMIN (ADMIN)**, em seguida em **Definições gerais (General Settings)**.
4. Toque em **Editar (Edit)** e renomeie o sistema. (Nome do local e número de série recomendados.)
5. Selecione **Iniciar sessão com ID institucional (Login with Institutional ID)** para ativar leitura da ID.

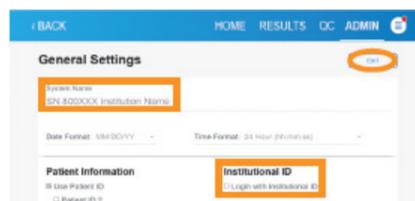

3

Adicionar Admin e Utilizadores Básicos

Para adicionar localmente:

1. Toque em **ADMIN (ADMIN)**, em seguida em **UTILIZADORES (USERS)**.
2. Toque em **Adicionar utilizador (Add User)**.
3. Definir um utilizador Admin.
4. Clique em **Confirmar (Confirm)**.
5. Clique em **Adicionar utilizador (Add User)** várias vezes para adicionar mais.

Para adicionar utilizadores dentro do Sistema de Gestão de Dados:

Consultar o manual do utilizador.

4

Configurar definições de bloqueio do QC

1. Toque em **ADMIN (ADMIN)**, em seguida em **DEFINIÇÕES DE BLOQUEIO DO QC (QC LOCKOUT SETTINGS)**.
2. Configure as Definições de bloqueio do QC de acordo com os requisitos da sua instituição.
3. Toque em **Confirmar (Confirm)**.

QC LOCKOUT SETTINGS


REPORTS

6

Sair do Cepheid OS/

Iniciar sessão no Windows

1. Sair do software Cepheid OS.
2. Toque em **Menu do utilizador (User Menu) > Sair (Exit)**.

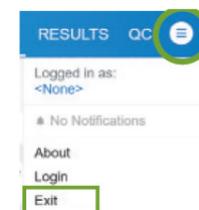

8

Ligar à rede

Duas opções para ligação à intranet da sua instituição:

Wi-Fi

1. Inserir o adaptador de Wi-Fi numa porta USB na parte traseira do ecrã tátil.
2. Selecione um sinal de Wi-Fi. Instalar o controlador se necessário.

Ethernet

1. Insira um cabo ethernet na porta Rede (Network) na parte de trás do ecrã tátil.

5

Relatório de qualificação da instalação

1. Uma vez concluída a instalação, toque em **ADMIN (ADMIN)**, em seguida em **RELATÓRIOS (REPORTS)**.
2. Toque em **QUALIFICAÇÃO DA INSTALAÇÃO (INSTALLATION QUALIFICATION)** para gerar, assinar e guardar um relatório.

7

Definir Data, Hora, e Idioma (se aplicável)

1. Toque sem soltar no ícone Iniciar (Start) do Windows e selecione **Definições (Settings)**.
2. Toque em **Hora e Idioma (Time & Language)**.
3. Toque em **Idioma (Language)**, em seguida em **Adicionar um idioma (Add a Language)**.
4. Selecione **Idioma (Language)** e toque em **Instalar (Install)**.
5. Selecione **Data e Hora (Date & Time)**.
6. Selecione o seu fuso horário.
7. Reinicie o ecrã tátil.

