

# GeneXpert® System – Wartungsprotokoll

Monat und Jahr:  
 Datum der letzten  
 Kalibrierungsprüfung:  
 Datum der Installation durch  
 den Servicetechniker:

Name der Einrichtung

GeneXpert Seriennummer

Anweisungen: 1. Machen Sie in den Feldern oben die folgenden Angaben: Name der Einrichtung, Seriennummer des GeneXpert, aktueller Monat und aktuelles Jahr, Datum der letzten Kalibrierungsprüfung und Datum der Installation durch den Servicetechniker.

2. Kreuzen Sie für jeden der unten aufgeführten Vorgänge das (die) Kästchen unter dem Datum an, an dem diese ausgeführt wurden, und tragen Sie in der untersten Zeile Ihre Initialen ein (maximal 2 Zeichen).

3. Speichern Sie die Datei, nachdem Sie die Daten eingegeben haben. Wir empfehlen, jeden Monat eine Datei abzuspeichern, sodass eine vollständige Aufzeichnung über die Vorgänge vorhanden ist.

<b>Täglich durchzuführende Wartungsaufgaben</b>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Arbeitsbereich reinigen																															
Alle Modultüren schließen																															
Benutzte Kartuschen entsorgen																															
<b>Wöchentlich durchzuführende Wartungsaufgaben</b>																															
Den GeneXpert-Computer und das Instrument ausschalten <sup>1</sup>																															
Gebläse-Vorfilter reinigen <sup>1</sup>																															
<b>Monatlich durchzuführende Wartungsaufgaben</b>																															
Tests archivieren <sup>2</sup>																															
Tests löschen <sup>2</sup>																															
<b>Vierteljährlich durchzuführende Wartungsaufgaben</b>																															
Kolbenstange und Kartuschenfächer reinigen <sup>1</sup>																															
Instrumentenoberflächen reinigen <sup>1</sup>																															
Gebläsefilter auswechseln <sup>1</sup>																															
Gebläse-Vorfilter auswechseln <sup>1</sup>																															
<b>Jährlich durchzuführende Wartungsaufgaben</b>																															
Jährliche Instrumentenwartung durchführen <sup>1</sup>																															
<b>Nach Bedarf</b>																															
Systemprotokoll-Bericht drucken <sup>1</sup>																															
Datenbank sichern <sup>2</sup>																															
I-CORE mit Systemprotokoll-Bericht drucken <sup>1</sup>																															
Initialen des Technikers (zwei Buchstaben)																															

1. Einzelheiten hierzu sind Kapitel 9 (Wartung und Instandhaltung) des Benutzerhandbuchs zu entnehmen.

2. Einzelheiten hierzu sind Kapitel 5 (Bedienungsanleitung) des Benutzerhandbuchs zu entnehmen.

Dies sind die Mindestempfehlungen für die Reinigung. An Ihrer Einrichtung sind möglicherweise häufigere Wartungsintervalle vorgeschrieben.

Literaturhinweis: GeneXpert Benutzerhandbuch (Art.-Nr. 302-8378-DE, Rev. C)