

# Αρχείο καταγραφής συντήρησης του συστήματος GeneXpert®

Μήνας και έτος:

Ημερομηνία τελευταίου ελέγχου βαθμονόμησης:

Ημερομηνία εγκατάστασης:

Όνομασία του ιδρύματος

Αριθμός σειράς GeneXpert

- Οδηγίες: 0. Καταχωρίστε την ονομασία του ιδρύματος, τον αριθμό σειράς GeneXpert, τον τρέχοντα μήνα και έτος, την ημερομηνία τελευταίου ελέγχου βαθμονόμησης και την ημερομηνία εγκατάστασης στα παραπάνω πεδία.
2. Για κάθε ενέργεια συντήρησης που αναφέρεται παρακάτω, επιλέξτε το πλαίσιο(α) κάτω από την ημέρα του μήνα στην οποία πραγματοποιήθηκαν οι ενέργειες και καταχωρίστε τα αρχικά σας (2 χαρακτήρες το μέγιστο) στην κάτω σειρά.
3. Αποθηκεύστε το αρχείο μετά την καταχώριση των δεδομένων. Συνιστάται η αποθήκευση ενός αρχείου κάθε μήνα για ένα πλήρες αρχείο δραστηριοτήτων.

Καθημερινή συντήρηση	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Καθαρισμός περιοχής εργασίας																															
Κλείσιμο των θυρών όλων των υπομονάδων																															
Απόρριψη των χρησιμοποιημένων φυσιγγών																															
<b>Εβδομαδιαία συντήρηση</b>																															
Απενεργοποίηση του υπολογιστή και του αναλυτή GeneXpert <sup>1</sup>																															
Καθαρισμός προφίλτρων του ανεμιστήρα <sup>1</sup>																															
<b>Μηνιαία συντήρηση</b>																															
Αρχειοθέτηση εξετάσεων <sup>2</sup>																															
Εκκαθάριση εξετάσεων <sup>2</sup>																															
<b>Τριμηνιαία συντήρηση</b>																															
Καθαρισμός ράβδου εμβόλου και υποδοχών φυσιγγών <sup>1</sup>																															
Καθαρισμός επιφανειών του αναλυτή <sup>1</sup>																															
Αντικατάσταση φίλτρων του ανεμιστήρα <sup>1</sup>																															
Αντικατάσταση φίλτρων προφίλτρων του ανεμιστήρα <sup>1</sup>																															
<b>Ετήσια συντήρηση</b>																															
Ελέγξτε την ετήσια συντήρηση του αναλυτή <sup>1</sup>																															
<b>Όπως απαιτείται</b>																															
Εκτύπωση αναφοράς αρχείου καταγραφής συστήματος <sup>1</sup>																															
Δημιουργία εφεδρικού αντιγράφου βάσης δεδομένων <sup>2</sup>																															
Καθαρισμός του I-CORE με τη χρήση βούρτσας καθαρισμού I-CORE <sup>1</sup>																															
Αρχικά τεχνικού (δύο γράμματα)																															

1. Ανατρέξτε στο κεφάλαιο 9 (Σέρβις και συντήρηση) στο εγχειρίδιο χρήστη για τη λεπτομερή διαδικασία.

2. Ανατρέξτε στο κεφάλαιο 5 (Οδηγίες λειτουργίας) στο εγχειρίδιο χρήστη για τη λεπτομερή διαδικασία. Αυτές είναι οι ελάχιστες συστάσεις για τον καθαρισμό. Το ίδρυμά σας μπορεί να απαιτεί την πραγματοποίηση συντήρησης πιο συχνά.

Παραπομπή: Εγχειρίδιο χρήστη GeneXpert GX Dx (P/N 302-8378-EL, Αναθ. C)