

GeneXpert®-järjestelmän kunnossapitoloki

Kuukausi ja vuosi:

Kalibrointitarkistus tehty viimeksi:

Asennuspäivä:

Laitoksen nimi

GeneXpert-sarjanumero

Ohjeet:

1. Anna yllä oleviin kenttiin laitoksen nimi, GeneXpert-sarjanumero, nykyinen kuukausi ja vuosi, viimeisin kalibrointitarkistuspäivä ja asennuspäivä.
2. Merkitse kunkin alla luetellun huoltotoimen kohdalla kuukaudesta sen päivän ruudut, jona toiminta suoritettiin, ja kirjoita nimikirjaimesi (enintään 2 merkkiä) alariville.
3. Tallenna tiedosto syötettyäsi tiedot. Suosittelemme, että tallennat yhden tiedoston kuukausittain, jotta saat täydellisen tallenteen toiminnoista.

Päivittäinen huolto	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
Puhdista työalue																																
Sulje kaikki moduulin luukut																																
Hävitä käytetyt kasetit																																
Viikoittainen huolto																																
Sammuta GeneXpert-instrumentti ¹ ja tietokone ¹																																
Puhdista tuulettimen esisuodattimet ¹																																
Kuukausittainen huolto																																
Arkistointitestit ²																																
Tyhjennystestit ²																																
Neljännenvuosittainen huolto																																
Puhdista männänvarsi ja kasettisyvennykset ¹																																
Puhdista instrumentin pinnat ¹																																
Vaihda tuulettimen suodattimet ¹																																
Vaihda tuulettimen esisuodattimet ¹																																
Vuosittainen huolto																																
Tarkista instrumentin vuosittainen huolto ¹																																
Tarpeen mukaan																																
Tulosta järjestelmälokiraportti ¹																																
Varmuuskopioi tietokanta ²																																
Puhdista I-CORE I-CORE-puhdistusharjalla ¹																																
Teknikon nimikirjaimet (kaksi kirjainta)																																

1. Katso yksityiskohtaiset ohjeet käyttöoppaan luvusta 9 (Huolto ja kunnossapito).

2. Katso yksityiskohtaiset ohjeet käyttöohjeen luvusta 5 (Käyttöohjeet).

Nämä ovat puhdistusta koskevat vähimmäissuosituksen. Laitoksesi saattaa vaatia huoltoa useammin.