

# GeneXpert® Registro di manutenzione sistema

Mese e anno:

Data ultimo controllo calibrazione:

Data di installazione:

Nome istituto

Numero di serie GeneXpert

- Istruzioni: 1. Immettere nei campi sopra riportati il nome dell'istituto, il numero di serie di GeneXpert, il mese e l'anno correnti, la data dell'ultima verifica di calibrazione e la data di installazione.
2. Per ciascuna delle attività di manutenzione elencate sotto, spuntare la casella o le caselle corrispondenti al giorno del mese in cui le attività sono state svolte e inserire le proprie iniziali (massimo 2 caratteri) nella riga in fondo.
3. Dopo aver inserito i dati, salvare il file. Si raccomanda di salvare un file ogni mese per ottenere una registrazione completa delle attività.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
<b>Manutenzione giornaliera</b>																															
Pulire l'area di lavoro																															
Chiudere tutti gli sportelli dei moduli																															
Gettare le cartucce usate																															
<b>Manutenzione settimanale</b>																															
Spegnere lo strumento GeneXpert e il computer <sup>1</sup>																															
Pulire i prefiltri delle ventole <sup>1</sup>																															
<b>Manutenzione mensile</b>																															
Archiviare le analisi <sup>2</sup>																															
Eliminare le analisi <sup>2</sup>																															
<b>Manutenzione trimestrale</b>																															
Pulire l'asta dello stantuffo e gli alloggiamenti delle cartucce <sup>1</sup>																															
Pulire le superfici dello strumento <sup>1</sup>																															
Sostituire i filtri delle ventole <sup>1</sup>																															
Sostituire i prefiltri delle ventole <sup>1</sup>																															
<b>Manutenzione annuale</b>																															
Verificare annualmente la manutenzione dello strumento <sup>1</sup>																															
<b>A seconda delle necessità</b>																															
Stampare il rapporto del registro di sistema <sup>1</sup>																															
Eseguire il backup del database <sup>2</sup>																															
Pulire I-CORE con lo spazzolino per la pulizia I-CORE <sup>1</sup>																															
Iniziali del tecnico (due lettere)																															

1. Per la procedura dettagliata, consultare il Capitolo 9 (Servizio di assistenza e manutenzione) del manuale dell'operatore.

2. Per la procedura dettagliata, consultare il Capitolo 5 (Istruzioni di funzionamento) del manuale dell'operatore.

Le presenti costituiscono le raccomandazioni minime essenziali per la pulizia. La struttura sanitaria di appartenenza può richiedere l'esecuzione di alcune operazioni di manutenzione con maggiore frequenza.