

Dziennik prowadzonych czynności konserwacyjnych systemu GeneXpert®

Miesiąc i rok:

Data ostatniego sprawdzenia wzorcowania:

Data instalacji:

Nazwa instytucji

Numer seryjny aparatu GeneXpert

- Instrukcje: 1. W powyższych polach wprowadzić nazwę instytucji, numer seryjny aparatu GeneXpert, bieżący miesiąc oraz rok, datę ostatniego sprawdzenia wzorcowania oraz datę instalacji.
 2. W odniesieniu do każdej czynności konserwacyjnej wymienionej powyżej należy zaznaczyć odpowiednie pole (pola) pod dniem miesiąca, w którym czynności zostały przeprowadzone oraz paraflować (nie więcej niż dwie litery) w dolnym wierszu.
 3. Po wprowadzeniu danych plik zapisać. Zalecamy zapisywanie jednego pliku dla każdego miesiąca, aby zapewnić pełną dokumentację czynności.

Konserwacja codzienna	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Wyczyścić obszar roboczy																															
Zamknąć drzwiczki wszystkich modułów																															
Wyrzucić zużyte kartridże																															
Konserwacja tygodniowa																															
Wyłączyć komputer i aparat systemu GeneXpert ¹																															
Wyczyścić filtry wstępne wentylatorów ¹																															
Konserwacja miesięczna																															
Zarchiwizować testy ²																															
Wyczyścić testy ²																															
Konserwacja kwartalna																															
Oczyścić tłok i wnęki kartridży ¹																															
Oczyścić powierzchnie aparatu ¹																															
Wymenić filtry wentylatora ¹																															
Wymenić filtry wstępne wentylatora ¹																															
Konserwacja roczna																															
Sprawdzić doroczne czynności konserwacyjne aparatu ¹																															
Zgodnie z potrzebami																															
Wydrukować raport systemowy ¹																															
Utworzyć kopię zapasową bazy danych ²																															
Czyszczenie modułu I-CORE przy użyciu szczotki I-CORE ¹																															
Inicjały technika (dwie litery)																															

1. Dokładna procedura znajduje się w rozdziale 9 (Serwisowanie i czynności konserwacyjne) instrukcji użytkownika.

2. Dokładna procedura znajduje się w rozdziale 5 (Instrukcja obsługi) instrukcji użytkownika.

Są to minimalne wymagania dotyczące czyszczenia. Dana instytucja może wymagać częstszego wykonywania czynności konserwacyjnych.