

# Registo de manutenção do sistema GeneXpert®

Mês e ano:

Data da última verificação da calibração:

Data da instalação:

Nome da instituição

Número de série do GeneXpert

**Instruções:**

1. Introduza, nos campos acima, o nome da sua instituição, número de série do GeneXpert, mês e ano atuais, data da última verificação da calibração e data da instalação.
2. Para cada atividade de manutenção abaixo, marque a(s) caixa(s) sob o dia do mês em que as atividades foram executadas e introduza as suas iniciais (máximo de 2 caracteres) na linha abaixo.
3. Guarde o ficheiro depois de introduzir a data. Recomenda-se guardar um ficheiro a cada mês para um registo completo das atividades.

<b>Manutenção diária</b>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Limpar a área de trabalho																															
Fechar todas as portas dos módulos																															
Eliminar cartuchos usados																															
<b>Manutenção semanal</b>																															
Desligar o instrumento GeneXpert <sup>1</sup> e o computador <sup>1</sup>																															
Limpar os pré-filtros da ventoinha <sup>1</sup>																															
<b>Manutenção mensal</b>																															
Arquivar testes <sup>2</sup>																															
Purgar testes <sup>2</sup>																															
<b>Manutenção trimestral</b>																															
Limpar a haste do êmbolo e os compartimentos do cartucho <sup>1</sup>																															
Limpar as superfícies do instrumento <sup>1</sup>																															
Substituir os filtros da ventoinha <sup>1</sup>																															
Substituir os pré-filtros da ventoinha <sup>1</sup>																															
<b>Manutenção anual</b>																															
Verificar a manutenção anual do instrumento <sup>1</sup>																															
<b>Conforme necessário</b>																															
Imprimir relatório de registos do sistema <sup>1</sup>																															
Efectuar uma cópia de segurança da base de dados <sup>2</sup>																															
Limpar o I-CORE utilizando a escova de limpeza I-CORE <sup>1</sup>																															
Iniciais do técnico (duas letras)																															

1. Consulte o procedimento detalhado no Capítulo 9 (Assistência e manutenção) do manual do utilizador.  
 2. Consulte o procedimento detalhado no Capítulo 5 (Instruções de funcionamento) do manual do utilizador.  
 Estas são recomendações mínimas quanto à limpeza. A sua instituição pode exigir que a manutenção seja efetuada com maior frequência.